


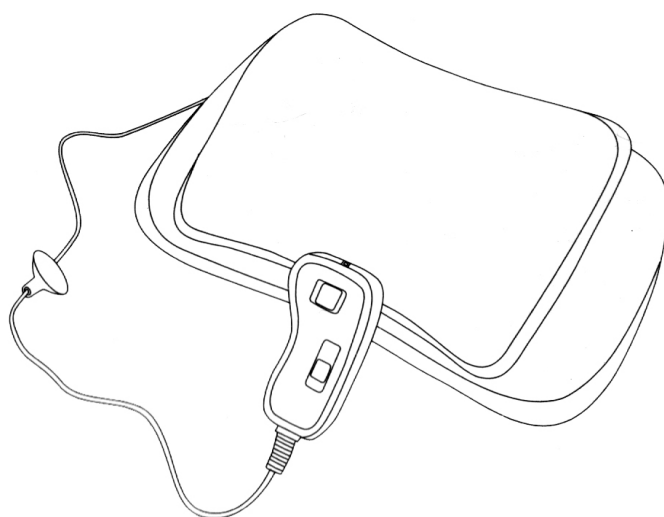

**JASTUK ZA MASAŽU
D2008**

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Zahvaljujemo Vam se na kupovini masažera. Molimo Vas da pre upotrebe, pažljivo pročitate ovo uputstvo i naročito obratite pažnju na, posebno istaknute mere opreza, kako biste koristili masažer na pravilan način.

Bilo bi poželjno da uputstvo odložite na lako dostupno mesto, ukoliko kasnije budete želeli da se podsetite nekih delova.

SADRŽAJ

UPUTSTVO ZA UPOTREBU	0
SADRŽAJ	1
SIGURNOSNE NAPOMENE	2
Odgovarajuće okruženje	2
Korisnici koji ne mogu koristiti masažer	2
Uputstvo za rukovanje daljinskim upravljačem	2
Situacije u kojima se ne sme koristiti masažer	2
Sklapanje i održavanje	3
Smernice u vezi utikača i kabla za napajanje	3
NAZIVI I FUNKCIJE DELOVA	3
Spoljašnja struktura	3
Unutrašnja struktura	3
Komande daljinskog upravljača	4
NAČIN UPOTREBE	4
OTKLANJANJE PROBLEMA	5
ČUVANJE I ODRŽAVANJE	5
SPECIFIKACIJE	6

SIGURNOSNE NAPOMENE

Odgovarajuće okruženje

- Nemojte koristiti masažer na vlažnim i prašnjavim mestima kako ne bi došlo do oštećenja uređaja.
- Nemojte koristiti masažer ukoliko je temperatura u okruženju veća od 40°C.
- Nemojte ostavljati masažer napolju.

Korisnici koji ne mogu koristiti masažer

Osobe koje pate od sledećih bolesti ili se nalaze u određenim stanjima koja su nabrojana, pre upotrebe uređaja, moraju konsultovati lekara.

- Osobe pod tretmanom, sa povredama ili anomalijama.
- Pacijenti sa tumorom.
- Trudnice ili žene koje imaju menstruaciju.
- Osobe koje imaju akutna oboljenja.

Uputstvo za rukovanje daljinskim upravljačem

- Ne koristite daljinski ukoliko su Vam ruke vlažne.
- Ne bacajte ga na zemlju ili u vodu.
- Ne vucite kabl na silu.
- Ne stavljajte ništa teško na daljinski.



OPREZ

- Tokom masaže, valjci se moraju kretati duž vrata kako Vam masaža ne bi pričinjavala bol.
- Nemojte zaspati u toku masaže.
- Nemojte koristiti masažer ukoliko ste pod dejstvom alkohola ili u sličnom stanju.
- Nemojte koristiti masažer duže od 30 minuta u kontinuitetu.

Situacije u kojima se ne sme koristiti masažer

Ukoliko se dogodi bilo šta od dole navedenog, isključite masažer i izvucite utikač iz utičnice. U slučaju ozbiljnijeg kvara, kontaktirajte dobavljača ili ovlašćenog servisera.

- Ukoliko se slučajno prospe voda na masažer ili daljinski upravljač.
- Ukoliko se podere presvlaka jastuka za masažu ili ukoliko se vidi unutrašnja struktura uređaja.
- Ukoliko Vam se jave bilo kakvi bolovi ili anomalije prilikom korišćenja.
- Ukoliko uređaj počne funkcionisati na neuobičajeni način.
- U slučaju da dođe do iznenadnog nestanka struje.
- Prilikom grmljavine.
- Tokom brze vožnje.

Sklapanje i održavanje


- Molimo Vas, nemojte sami rastavljati masažer niti skidati presvlaku kako biste izbegli oštećenje masažera.
- Nikada nemojte sami rastavljati ili popravljati masažer. Za sve popravke i održavanje uređaja, obratite se ovlašćenom servisu.

Smernice u vezi utikača i kabla za napajanje


- Proverite voltažu (radni napon), struju, anodu i katodu (**uređaj je predviđen samo za jednosmernu struju**).
- Kada izvlačite utikač, nemojte vući kabl, vucite samo utikač iz utičnice.
- Nemojte stavljati ništa teško na kabl za napajanje.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je kabl za napajanje oštećen. Isključite masažer, izvucite utikač iz utičnice i kontaktirajte ovlašćeni servis radi popravke ili zamene kabla.

NAZIVI I FUNKCIJE DELOVA


Spoljašnja struktura

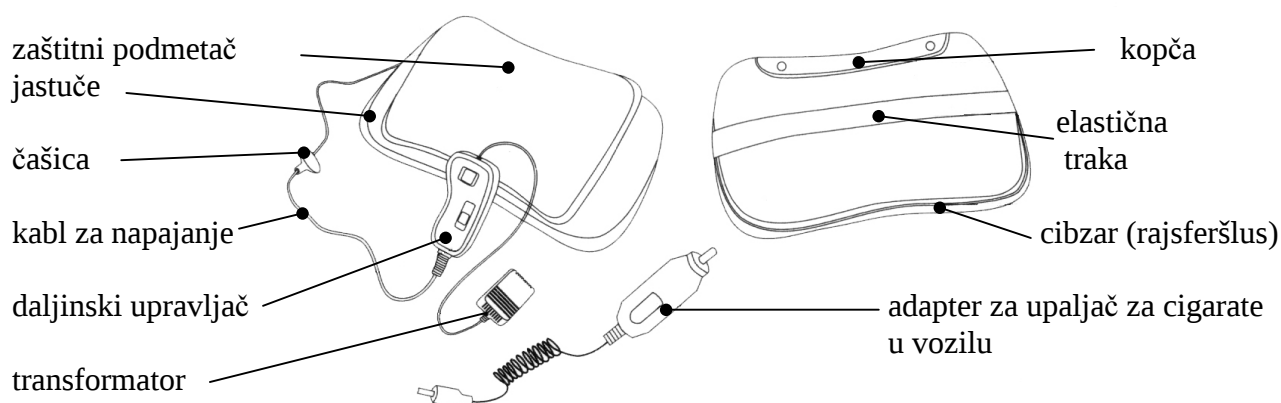

Unutrašnja struktura

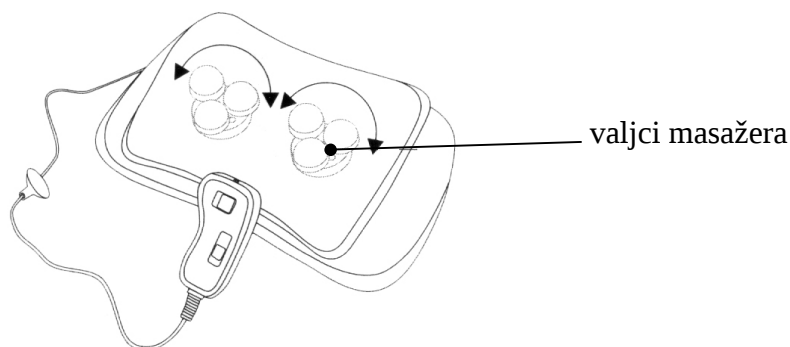

Komande daljinskog upravljača

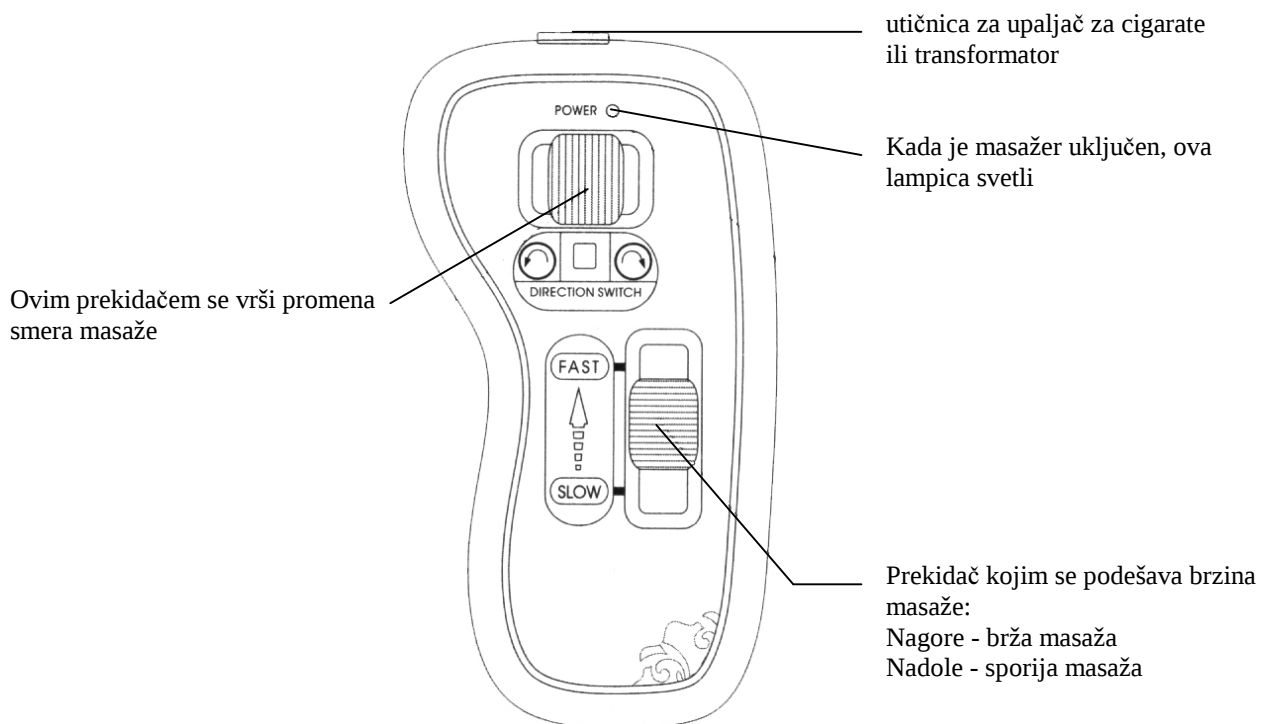

NAČIN UPOTREBE

- Jastuče prekrijte zaštitnim podmetačem. (Savet: za hladno vreme okrenite nagore stranu koja je obložena vunom, a za toplo vreme, okrenite drugu stranu).
- Priključite daljinski upravljač na adapter za upaljač (ukoliko masažer koristite u vozilu) ili transformator priključite na strujnu mrežu. Čim se lampica upali, masažer je spreman za rad.
- Masažer otpočinje sa radom, čim na daljinskom upravljaču odaberete smer masaže (Savet: 10 do 15 minuta u svakom smeru).
- Odaberite brzinu masaže koja Vam najviše odgovara.
- Nakon upotrebe, prekidač za izbor smera masaže, postavite u srednji položaj da zaustavite masažu a potom izvucite utikač adaptera iz upaljača za cigarete ili transformator iz utičnice u zidu.

OTKLANJANJE PROBLEMA

Simptomi	Mogući uzroci	Rešenje
"Xiu xiu" ili "da da" zvuk	Zvuk nastaje usled trenja između mehanizma za masažu i kožne presvlake ili od same konstrukcije masažera	to je normalno da se čuje
Masažer ne radi	Da li je uređaj suviše topao, jer je dugo radio?	Isključite ga i ostavite isključenog više od 30 minuta
	Da li se utikač (transformatora ili adaptera) izvukao iz utičnice?	Ponovo ga utaknite
	Da li je prekidač promene smeru u srednjem položaju?	Pomerite ga ulevo ili udesno.

Ukoliko predložena rešenja ne pomažu kod problema, isključite masažer, izvucite utikač iz utičnice i pozovite lokalnog dobavljača ili ovlašćenog servisera radi popravke.

ČUVANJE I ODRŽAVANJE

1. Čišćenje

- Pre početka čišćenja, isključite masažer i izvucite utikač iz utičnice.
- Zaštitni podmetač možete oprati jednom na svaka dva do tri meseca, a tada ga dobro i u potpunosti osušite.
- Kada čistite daljinski upravljač koristite isključivo suhu i mekanu krpicu.



OPREZ

- Prilikom čišćenja masažera, nemojte upotrebljavati, alkohol, deterdžent, abrazivna sredstva i slično, kako biste izbegli oštećenje i promenu boje uređaja.

2. Održavanje

- Isključite masažer i izvucite utikač iz utičnice.
- Uređaj održavajte čistim i dalje od vlažnih prostora.
- Ukoliko duže vreme nećete koristiti masažer, spakujte ga u plastičnu vrećicu ili slično (koju morate sami nabaviti) kako biste sprečili da se na njemu nagomilava prašina.

SPECIFIKACIJE

Opis : Jastuk za masažu

Model : D2008

Maksimalna brzina : Približno 42 obrtaja/minut

Dimenzije : 37cm (dužina) x 14,5 (širina) x 26cm (visina)

Bruto težina : 3 kg.

Neto težina : 2,7 kg.

Radni napon (voltaža) : 12V DC – jednosmerna struja

Struja : 1,5-2,0 A

Napon : 20 W

Klasifikacija uređaja : 

Transformator : -  +