

UPUTSTVO ZA UPOTREBU


RT-D012 Masažer u formi podmetača

SADRŽAJ

OPIS PROIZVODA	1
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE	2
NAZIV I FUNKCIJE DELOVA	3
KOMANDE DALJINSKOG UPRAVLJAČA	3
RUKOVANJE	4
FUNKCIJE I MOGUĆNOSTI	5
OTKLANJANJE PROBLEMA	5
ODRŽAVANJE UREĐAJA	6
PROVERA ISPRAVNOSTI	6
SPECIFIKACIJE	6



prevod i obrada :
Milan R. Radojević

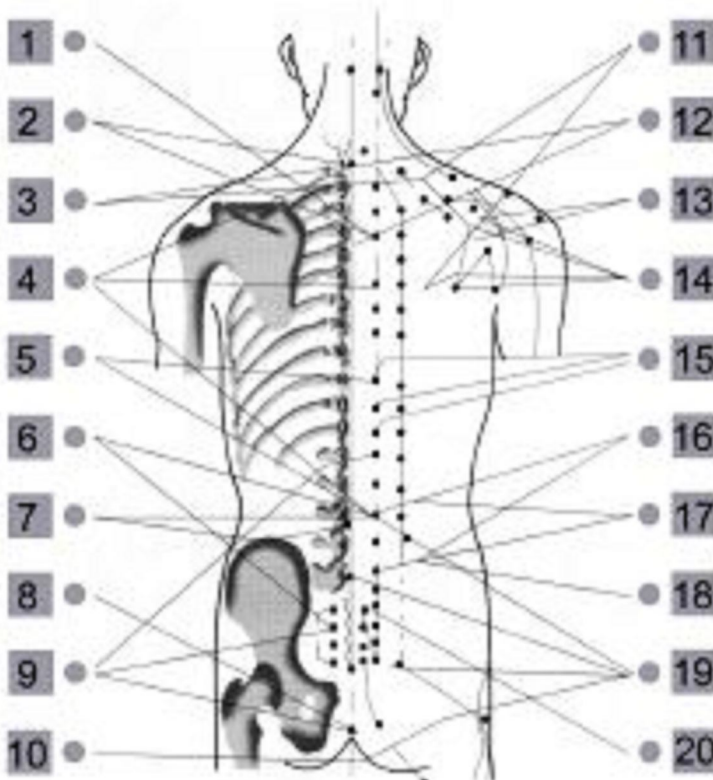

1. psihička iznurenost
2. reuma i osećaj hladnoće
3. okoštavanje pršljenova
4. visok krvni pritisak
5. nesanica
6. za poboljšanje opšteg stanja
7. prerana i nevoljna ejakulacija
8. frigidnost
9. hemoroidi
10. artritis (kolena)
11. ukočen vrat
12. astma
13. ukočenost ruku
14. upala zgloba ramena
15. stomadni bolovi
16. akutni i hronični lumbago
17. slabost u nogama i koljenima
18. dijareja i mišićna tenzija
19. išijas
20. mokrenje u krevet

Mnogi ljudi osećaju bolove u vratu i leđima kada su iznureni. Međutim, ukoliko ih neko izmasira, osećaju se mnogo prijatnije. Kako to da nam masaža pomaže?

Masaža je medicinski tretman koji uključuje gnječenje i pritiskanje delova tela, koji potiče iz drevne prošlosti. Posmatrajući mapu akupunkturnih tačaka, vidimo da na leđima postoje područja koja se odnose na razne organe našeg tela. Tradicionalna kineska medicina smatra da kruženje krvi kroz naše telo hrani organe povezane sa pet elemenata (drvo-jetra, vatra-srce, zemlja-slezina, metal-pluća i voda-bubrezi npr.) i pospešuje rad unutrašnjih organa. Puls utiče na čovekov duh, dok žuč utiče na čovekov izgled. Kako masaža aktivira puls i žučnu kesicu, to može uticati na Vas u smislu poboljšanja cirkulacije mekih tkiva i poboljšanja funkcionisanja srca i pluća. Sa stanovišta moderne medicine, gnječenje i pritiskanje ritmičnim pokretima, dovodi do proširenja krvnih sudova u tkivu, poboljšava cirkulaciju krvi, ubrzava metabolizam, blago stimuliše nervni sistem, poboljšava tonus i elastičnost mišića i na taj način vraća funkcionalnost leđima i struku.

Uvaj uređaj koristi navedene medicinske principe, te putem masaže gnječenjem, pritiskanjem i mehanizmima koji kotrljanjem i vibracijama, pospešuju cirkulaciju, poboljšava metabolizam i povećava imunitet tela. Stoga uživajte u udobnoj masaži koja će vam pričiniti zadovoljstvo.

OPIS PROIZVODA

Ovaj proizvod je integracija tradicionalne masaže gnječenjem, vibracijama i moderne visoke tehnologije. Svojim mehanizmima koji vrše masiranje vratnog dela, pomičnom strukturom koja vrši masažu leđa i struka, vibracionim mehanizmom u sedištu i terapijom infracrvenim zracima (zagrevanjem) uređaj će Vam omogućiti poboljšanje zdravstvenog stanja dok se odmarate u slobodno vreme.

Snažnom i ravnomernom masažom delova tela na koje se primenjuje, ne samo da stimuliše meka tkiva, pospešuje cirkulaciju i oslobađa od mišićne napetosti, već opušta i ojačava ledne mišiće.

Napravili ste izvrstan izbor uređaja koji poboljšava zdravlje Vas i Vaših ukućana a mogao bi biti i savršen poklon za porodicu i prijatelje.



ODRŽAVANJE UREĐAJA

Koristite vlažnu krpu sa blagim sredstvom za čišćenje a potom temeljno prebrišite suvom krpom i sačekajte da se osuši. 	 OPREZ Ne upotrebljavajte korozivne tečnosti (kao što je vitriol) za čišćenje masažera.  
Ne stavljajte podmetač blizu vatre ili blizu grejnih tela koja razvijaju veću temperaturu	
Ne stavljajte podmetač u prostorije u kojima je koncentracija vlage velika	

PROVERA ISPRAVNOSTI

 Molimo Vas da proverite	da li se javlja? oštar miris; zagrevanje kablova i žica; povremeno ne reagovanje na komande; druge anomalije PREKINITE KORIŠĆENJE  u slučaju nezgode, izvucite utikač iz zida i kontaktirajte našu kompaniju ili dobavljača. Nemojte sami rastavljati ili popravljati
---	---

SPECIFIKACIJE

Opis proizvoda :	Masažer u formi podmetača
Model :	RT-D012
Radna voltaža :	220-240 ~
Radna frekvencija:	50 Hz
Potrošnja :	35 W
Vreme rada :	30 minuta u kontinuitetu
Sigurnosni dizajn :	

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

Pre upotrebe, molimo Vas, pažljivo pročitajte ovaj odeljak uputstva i koristite podmetač na odgovarajući način.

Molimo Vas da se pažljivo pridržavate uputstva kako biste izbegli povrede ili oštećenje proizvoda.

Iz bezbednosnih razloga i u cilju isticanja određenih opasnosti i mogućih povreda, ukoliko se uređaj nepravilno koristi, neke napomene su označene kao "UPOZORENJE" i "OPREZ".

	UPOZORENJE:	Nepravilno korišćenje može prouzrokovati ozbiljne povrede korisnika.
	OPREZ:	Nepravilno korišćenje može prouzrokovati povrede korisnika ili oštećenje uređaja.

Nakon iščitavanja uputstva, odložite ga na sigurno mesto i na dohvat ruke u slučaju kasnijeg podsećanja.

UPOZORENJE:		OPREZ:	
	Sledeće kategorije lica moraju konsultovati lekara pre upotrebe podmetača: Pacijenti sa tumorom. Osobe koje boluju od akutnih bolesti. Trudnice ili žene sa menstruacijom. Osobe sa srčanim problemima. Osobe pod tretmanom, sa povredama ili anomalijama.		U slučaju nestanka struje, isključite uređaj i izvucite kabl za napajanje iz zida
	Ukoliko se kabl za napajanje ošteti, može ga zameniti samo proizvođač ili ovlašćeni serviser ili slična kvalifikovana osoba, kako ne bi došlo do nezgode.		Koristite isključivo dozvoljeni mrežni napon (voltažu) za napajanje uređaja.
	Isključivo ovlašćeni serviseri mogu vršiti, rastavljanje, popravke i prepravke uređaja		Nakon upotrebe uređaja, isključite ga i kabl za napajanje izvucite iz zidne utičnice.
	Ne koristite i ne odlažite podmetač u kupatilu ili drugim vlažnim mestima.		Izvucite kabl za napajanje iz zida, ukoliko ne koristite uređaj.

FUNKCIJE I MOGUĆNOSTI

MOGUĆNOSTI


- Masaža gnječenjem (knead) obezbeđuje dve osnovne karakteristike tradicionalne masaže: Simulacijom raznovrsne i masaže koju sprovodi maser ili maserka, ojačava mišiće i oslobađa od osećaja umora i iscrpljenosti.

Ritmička masaža pruža osećaj zadovoljstva i opuštenosti dok mehanizam vrši masažu celih leđa duž kičmenog stuba.



FUNKCIJE


- Oslobađa od mišićne napetosti
- Dubinska masaža mišićnog tkiva Vam pomaže da se relaksirate i oslobodite umora
- Oslobađa od bolova u leđima i natečenosti mišića usled umora
- Poboljšava cirkulaciju krvi u organizmu.

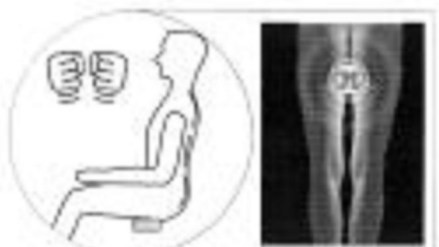

OTKLANJANJE PROBLEMA

Simptom	Molimo Vas da proverite	Rešenje
Masažer ne radi	1. da li je nestala struja 2. možda se utikač izvukao iz zida 3. da li je uključen prekidač	1. ponovo ga uključite kada dođe struja 2. ponovo ga utaknite u utičnicu 3. uključite ga
Mod gnječenja ne radi	1. da li je ovaj mod aktiviran	1. aktivirajte ga
Vibracija ne radi	1. da li je ta funkcija uključena 2. da li se utikač izvukao iz zida	1. aktivirajte tu funkciju 2. ponovo ga utaknite u utičnicu
Uređaj je iznenada prestao da radi	1. da li je nestala struja 2. možda se utikač izvukao iz zida	1. ponovo ga uključite kada dođe struja 2. ponovo ga utaknite u utičnicu

NAZIV I FUNKCIJA DELOVA

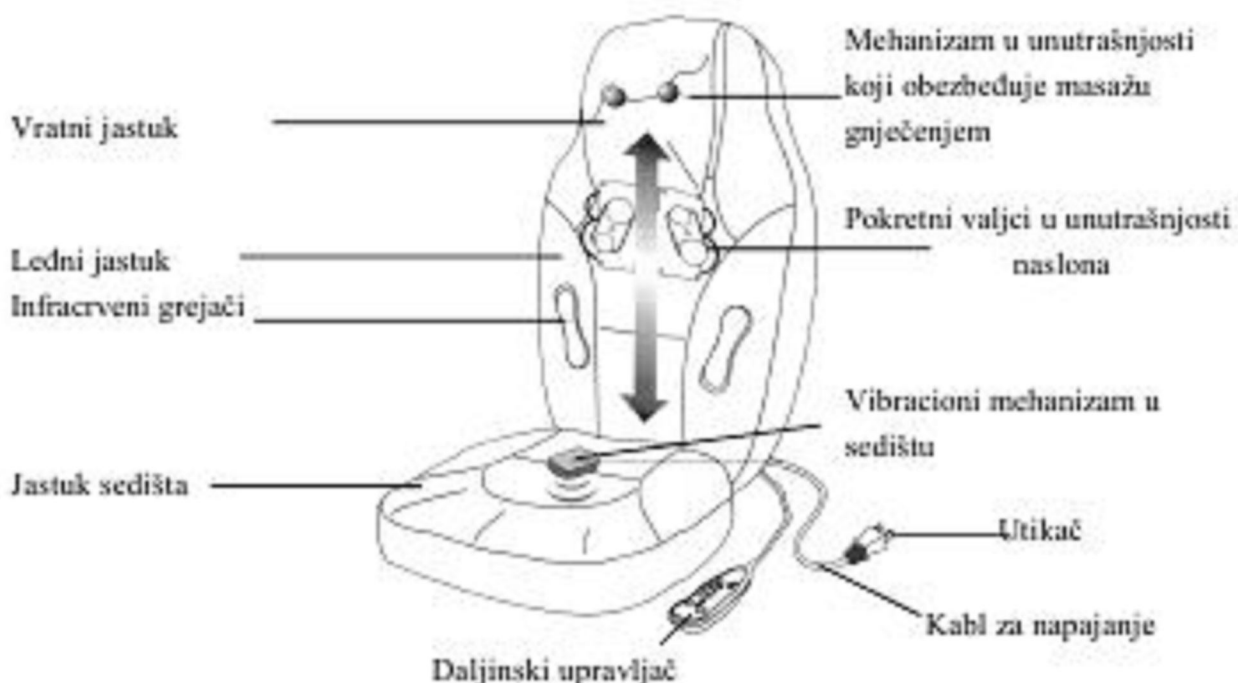


KOMANDE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

1. POWER: Uključuje/isključuje uređaj. Kada se uređaj uključi, podešen je na 20 minuta rada a potom prikazuje preostalo vreme. Ponovnim pritiskom na taster POWER uređaj se isključuje.

2. TIMING: Kada pokrenete uređaj, možete izabrati trajanje masaže od 10, 20 ili 30 minuta, što će odmah biti prikazano na LCD ekranu. Nakon što podesite vreme, na ekranu se prikazuje preostalo vreme rada.

3. AUTO: Nakon što uključite uređaj, pritiskom na ovaj taster pokreće se automatski mod masaže.

4. Back kneading: Ovim tasterom uključujete ili isključujete masazu leđa. Preporučeni mod je "Upper" što znači da samo gornji deo tela obuhvaćen masažom. Kada se uređaj isključi, mehanizam za masazu se nalazi u krajnjem gornjem položaju.

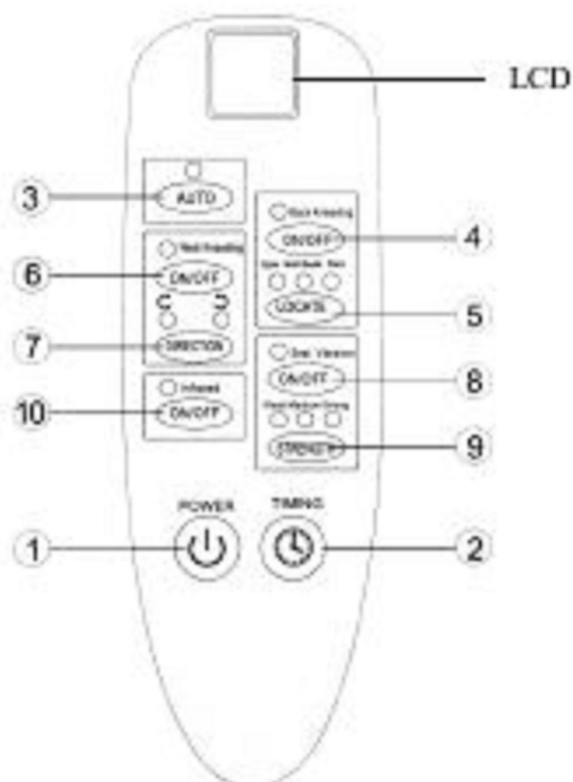

5. **LOCATE:** Ovim tasterom, birate između tri područja masaže – Gornji deo tela (Upper), Vrat i ramena (Neck&Shoulder) ili Leda i struk (Waist).

6. **Neck kneading:** Taster služi za uključivanje ili isključivanje masaže vratnog dela. Preporučeni smer masaže je u smeru kazaljke na satu.

7. **DIRECTIONS:** Određuje smer masaže vratnog dela. Možete izabrati jednu od dve opcije – u smeru kazaljke na satu i suprotno od kazaljke na satu.

8. **Seat vibrations:** Tastetom uključujete ili isključujete vibracije sedišta. Preporučena jačina je umerena (Medium).

9. **STRENGTH:** Ovim tasterom određujete jačinu vibracije sedišta. Možete izabrati jednu od tri opcije slabo (Weak), umereno (Medium) ili snažno (Strong)

10. **Infrared:** Uključuje ili isključuje terapiju infracrvenim zracima

UKOVLJEVANJE

1. Priključite uređaj na strujnu mrežu, uključite masažer i na LCD-u će se pojaviti natpis "ON"
2. Pritisnite taster "POWER" da otpočnete sa masažom. Za detalje u vezi masaže pogledajte deo uputstva pod nazivom "Komande daljinskog upravljača" na prethodnoj strani.
3. Podmetač za masažu možete staviti na fotelju, stolicu i slično ili ga položiti na krevet.



4. Da biste zaustavili masažu, pritisnite taster "POWER" još jednom a potom izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.



UPOZORENJE

Ukoliko se javi bilo kakva anomalija ili oštećenje prilikom korišćenja uređaja, isključite masažer, izvucite utikač iz zida i pozovite lokalnog dobavljača ili ovlašćenog serviser. Bilo kakvo rastavljanje uređaja od strane ne kvalifikovanih lica je zabranjeno.