


UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

RT-2031A Jastuk za masažu gnječenjem i lupkanjem

1. Primenjuje tradicionalne masažne tehnike gnječenjem i lupkanjem
2. Lako rukovanje omogućuje momentalnu masažu
3. Funkcionalan izgled, mogućnost odabira masaže određenih delova tela, praktična upotreba

Sadržaj

VAŽNE NAPOMENE VEZANE ZA BEZBEDNO RUKOVANJE	1
KRATAK OPIS	2
SPOLJNA STRUKTURA	2
NAČIN RUKOVANJA	2
NAČIN ČUVANJA	3
PREGLED	3
SPECIFIKACIJA	3

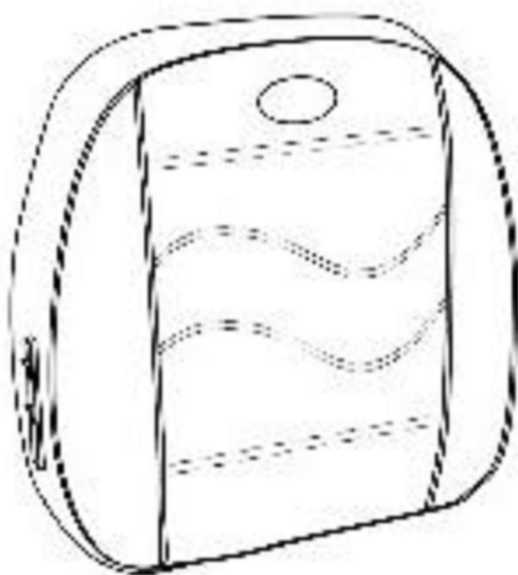

VAŽNE NAPOMENE VEZANE ZA BEZBEDNO RUKOVANJE

- Pre upotrebe, pažljivo pročitajte napomene vezane za bezbedno rukovanje ovim proizvodom i pravilno ga koristite.
- Ovde naznačene napomene omogućuju vam da ovaj proizvod koristite na bezbedan i ispravan način.
- Da bi se jasno naznačio stepen opasnosti, napomene su, u zavisnosti od mogućeg ishoda, podeljene u dve grupe "UPOZORENJE" i "NAPOMENA"

Obe vrste napomena su vezane za bezbednost korisnika i trebalo bi ih se pridržavati.



UPOZORENJE

Nepravilno rukovanje ovim proizvodom može da dovede do ozbiljnih povreda.



NAPOMENA

Nepravilno rukovanje može da prouzrokuje povrede korisnika ili oštećenje proizvoda.

- Nakon što ste pažljivo pročitali uputstva za rukovanje molimo vas da ih stalno držite na dohvat ruke.

UPOZORENJE		NAPOMENA	
	● Pacijenti sa malignim oboljenjima ● Trudnice ili žene u toku menstrualnog ciklusa ● Osobe sa srčanim oboljenjima ● Osobe sa akutnim oboljenjima ● Osobe sa drugim zdravstvenim tegobama ili osobe podvrgnute lečenju		Ukoliko je isključen, izvući utikač iz utičnice.
	Ne koristiti ukoliko se prekidač razdvoji od kabla		Koristiti samo nominalni napon
	Ne koristiti, niti čuvati u kupatilu ili na vlažnom mestu		Ukoliko ga sklanjate za kasniju upotrebu izvućite utikač iz utičnice
	Samo ovlašćenim tehničkim licima dozvoljeno je da intervenišu u slučaju bilo kakvih kvarova, popravki ili izmena proizvoda		Ne čistiti benzinom, deterdžentom itd. Ne prskati proizvod pesticidom


KRATAK OPIS

Ovaj proizvod predstavlja savršen spoj tradicionalnih masažnih tehnika gnječenjem i lupkanjem i moderne visoke tehnologije. Kompletna masažna konstrukcija koja se sastoji od elemenata za gnječenje sa rotacijom i lupkanje omogućuje masažu refleksnih tačaka u predelu pojasa, leđa, nogu, tabana i pruža vam na taj način vrhunsko uživanje u masaži.

Ujednačena i efikasna masaža ne samo da poboljšava elastičnost mekog tkiva, cirkulaciju, funkciju kolateralna i nervnog sistema, već takođe ublažava zamor mišića i podstiče snagu duha i obnavlja vašu energiju. Pored toga, blagotvorno utiče na napetost u predelu pojasa i poboljšava imune funkcije organizma. Ne predstavlja samo neophodan i praktičan kućni proizvod za održavanje kondicije, već i idealan poklon za vašu rodbinu i prijatelje.

SPOLJNA STRUKTURA

1. Prekidač za lupkanje
2. Prekidač za gnječenje
3. Kabl za napajanje
4. Utikač
5. Unutrašnji mehanizam za gnječenje
6. Unutrašnji mehanizam za gnječenje i lupkanje

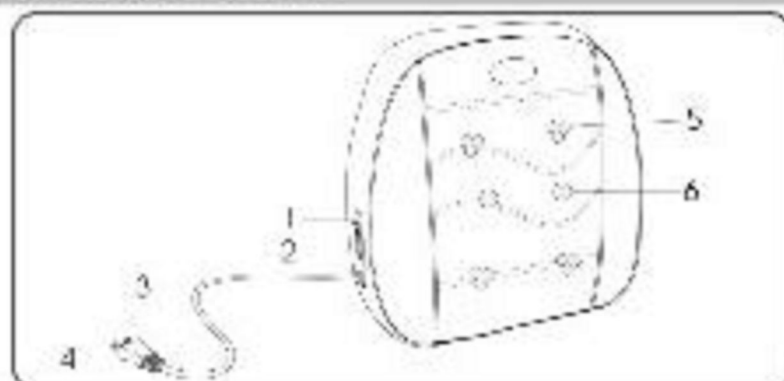

NAČIN RUKOVANJA

1. Prvo uključite u struju.
2. Pritisnite prekidač za masažu lupkanjem na bočnoj strani jastuka da bi ste uključili opciju za lupkanje koja vam pruža ujednačenu i efikasnu masažu lupkanjem. Da bi ste prekinuli masažu, isključite jastuk pritiskanjem prekidača.
3. Pritisnite prekidač za masažu gnječenjem na bočnoj strani jastuka da bi ste uključili opciju za gnječenje koja vam pruža ujednačenu i efikasnu masažu gnječenjem. Da bi ste prekinuli masažu, isključite jastuk pritiskanjem prekidača.
4. Kada ne koristite masažer, izvući utikač iz utičnice.



UPOZORENJE

Ukoliko prilikom korišćenja proizvoda dođe do bilo kakvih oštećenja ili nepravilnosti, obratite se nadležnom licu za održavanje i ne rastavljati ga ili popravljati bez prisustva stručnog lica.

NAČIN ČUVANJA

● Čistiti absorbirajućom krpom i pustiti da se prirodno osuši na provetrenom mestu. 	 UPOZORENJE Za brisanje ne koristiti korozivne tečnosti
● Ne držati blizu vatre ili na mestu sa visokom temperaturom.	
● Ne držati na vlažnom mestu.	

NAPOMENA

 Potrebno je povremeno kontrolisati	Sledeće pojave: ● miris paljevine ● nepažljivo rukovanje ● pregrevanje električnih instalacija ● druge neuobičajene pojave	 Prestati sa korišćenjem U slučaju nesreće izvucite utikač i obratite se predstavniku naše firme. Ne pokušavajte da sami rastavljate ili popravljate proizvod.
---	---	--

SPECIFIKACIJE

Opis	Jastuk za masažu gnječenjem i lupkanjem	Frekvencija	50Hz
Model	RT-2031A	Snaga	40W
Napon	220V~	Standard	