

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kompjuterizovani jastuk za masažu gnječenjem i lupkanjem

RT-2031B



prevod i obrada :
Milan R. Radojević

SADRŽAJ

OPIS PROIZVODA -----	1
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE-----	1-2
NAZIV I FUNKCIJA DELOVA -----	3
RUKOVANJE -----	4
OTKLANJANJE PROBLEMA -----	5
NAČINI ODRŽAVANJA-----	5
SPECIFIKACIJE -----	5

OPIS PROIZVODA

Ovaj proizvod je integracija tradicionalne masaže gnječenjem, lupkanjem i moderne visoke tehnologije. Opremljen setom mehanizama koji svojim pokretanjem efikasno vrše gnječenje i tapkanje i na taj način masiraju područje na koje se primenjuje uređaj.

Ravnomerna i moćna masaža delova tela na koje se primenjuje potpomaže bolju cirkulaciju i istovremeno uz opuštanje nervnih završetaka, oslobađa od mišićne napetosti.

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

Pre upotrebe, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i koristite jastuk na odgovarajući način.

Oznake upozorenja Vam pomažu da jastuk koristite na pravilan i bezbedan način.

U cilju isticanja određenih opasnosti i mogućih povreda, ukoliko se uređaj nepravilno koristi, neke napomene su označene kao "UPOZORENJE" i "OPREZ".

	UPOZORENJE:	Nepravilno korišćenje može prouzrokovati ozbiljne povrede korisnika.
	OPREZ:	Nepravilno korišćenje može prouzrokovati povrede korisnika ili oštećenje uređaja.

Nakon isčitavanja uputstva, odložite ga na sigurno mesto i na dohvat ruke u slučaju kasnijeg podsećanja.


Sledeće kategorije lica moraju konsultovati lekara pre upotrebe jastuka:

 ZABRANE:	Osobe pod tretmanom, sa povredama ili anomalijama.
	Pacijenti sa tumorom.
	Trudnice ili žene koje imaju menstruaciju.
	Osobe koje boluju od osteoporoze.
	Osobe koje boluju od akutnih bolesti.
	Osobe sa srčanim problemima.
	Osobe koje imaju pejsmejker ili neki drugi unutrašnji električni uređaj.

OPREZ

	Ukoliko se ošteti utičnica, kabl za napajanje ili utikač ne koristite uređaj.
	Ne koristite i ne odlažite jastuk u blizini grejnih tela kao što su peći i sl. ili na jakom suncu.
	Ne koristite i ne odlažite jastuk u kupatilu ili drugim vlažnim mestima.
	Ne rukujte uređajem dok su vam ruke vlažne.
	Nemojte dozvoliti da Vam kontrolni panel pada na zemlju i ne stavljajte ga u vodu.
	Kada izvlačite utikač za napajanje NE vucite sam kabl već uhvatite za ojačani kraj.
	Isključivo ovlašćeni serviseri mogu vršiti, rastavljanje, popravke i prepravke uređaja. U slučaju bilo kakvih problema u radu, molimo Vas da odmah kontaktirate svog lokalnog dobavljača.
	Ukoliko ne nameravate da uređaj koristite duže vreme ili prilikom čišćenja i održavanja, izvucite kabl za napajanje iz zida i vodite računa da Vam ruke nisu vlažne.
	Kada ne koristite uređaj, kabl za napajanje izvucite iz zidne utičnice.
	U slučaju nestanka struje, isključite uređaj i izvucite kabl za napajanje iz zida.

NAZIV I FUNKCIJA DELOVA

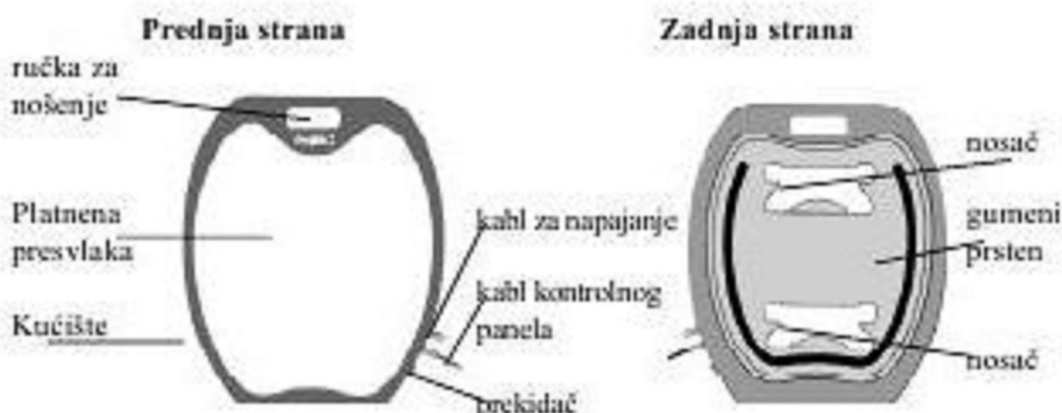

OPIS KOMANDI I LAMPICA (INDIKATORA)

Indikatori rada (lampice)

ako svetli - uređaj radi
ako treperi - uređaj je u pripravnosti (stand by)

ako treperi crveno - automat.mod
ako svetli crveno - masaža u smeru kazaljke na satu
ako svetli zeleno - masaža u suprotnom smeru

ako treperi zeleno - automat.mod
ako svetli zeleno - brža masaža
ako svetli crveno - sporija masaža

ako treperi crveno - automat.mod
ako svetli zeleno - jača masaža
ako svetli crveno - slabija masaža

Puna automatizacija uklj./isklj.

(prepodrešeno vreme masaže je 5 minuta)

Gnječenje (mešenje) uklj./isklj.

smer masaže gnječenjem

brzina masaže gnječenjem


Lupkanje (tapkanje) uklj./isklj.

jačina masaže lupkanjem



RUKOVANJE

- Navucite zaštitnu platnenu presvlaku preko jastuka
- Priključite uređaj na strujnu mrežu
- Kada pritisnete prekidač, lampica počinje da treperi a potom izaberite željenu funkciju na kontrolnom panelu
- Kada želite da odložite uređaj, nakon završetka rada, zaustavite sve funkcije, isključite uređaj i izvucite utičnicu iz zida.

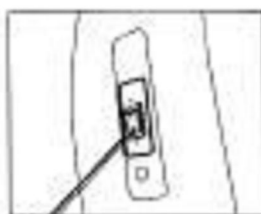

prekidač

OSNOVNI POLOŽAJI



leđa i struk



butine



noge i listovi



stopala



OPREZ

Ukoliko se javi bilo kakva anomalija prilikom korišćenja uređaja, isključite masažer, izvucite utikač iz zida i pozovite lokalnog dobavljača ili ovlašćenog servisera radi popravke.

OTKLANJANJE PROBLEMA

Simptomi	Mogući uzroci/rešenja
Zvuci trenja	To je normalan zvuk
Zvuci kuckanja Zvuci vibracija	To je normalan zvuk
Uređaj se iznenada zaustavio sam od sebe iako je trebalo još da radi, ili je iznenada prestao sa masažom	U pitanju je ugrađena zaštita od pregrevanja, isključite uređaj i pustite ga da se sam ohladi (više od 30 minuta)

NAČINI ODRŽAVANJA

Koristite vlažnu krpu sa blagim sredstvom za čišćenje a potom temeljno prebrišite suvom krpom i sačekajte da se osuši. 	 OPREZ Ne upotrebljavajte korozivne tečnosti kao što je vitriol za čišćenje
Ne stavljajte jastuk blizu vatre ili blizu gorenih tela koja razvijaju veću temperaturu	
Ne stavljajte jastuk blizu vlage	

SPECIFIKACIJE

Opis	Komjuterizovani jastuk za masažu sa gnječenjem i lupkanjem	Frekvencija	50/60 Hz
Model	RT-2031B	Potrošnja	40W
Voltaža	220-240 V~	klasifikacija	